

IZOLACIJA AMEBA

Uputstva za uzimanje i slanje uzoraka

Strugotina rožnjače

Strugotinu rožnjače uzima oftalmolog. Uzorak staviti u 0,5 ml sterilnog fiziološkog rastvora i transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Biopat

Uzorak staviti u 1ml sterilnog fiziološkog rastvora, transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Likvor

2ml likvora transportovati u sterilnoj posudi sa poklopcem na navoj, na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.