

## **DOKAZIVANJE *ECHINOCOCCUS GRANULOSUS* - NATIVNI PREPARAT**

### **Uputstva za transport uzoraka**

#### **Aspirat ciste**

Aspirat ehinokokne ciste uzet špricom i iglom transportovati u špricu sa zatvorenim vrhom, u roku od 2 sata, na sobnoj temperaturi ili u roku od 24 sata na +4 °C. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

#### **Cista**

Ehinokoknu cistu transportovati u sterilnom fiziološkom rastvoru (tako da cista bude potopljena), u čistoj, zatvorenoj posudi, na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na +4 °C u roku od 24 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.