

## **ARTROPODE – IDENTIFIKACIJA**

### **Uputstva za uzimanje i transport uzoraka**

#### **Artropoda**

Artropodu staviti (sa što manje mehaničkog pritiska) u čistu posudu sa poklopcem na navoj,. U posudu se može dodati 70% alkohol tako da artropoda bude potopljena. Transportovati na sobnoj temperaturi. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

#### **Strugotina kože**

Strugotinu kože staviti u čistu posudu sa poklopcem na navoj i transportovati na sobnoj temperaturi. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

#### **Bioptat**

Bioptat staviti u čistu posudu sa poklopcem na navoj u koju je prethodno dodat fiziološki rastvor u količini koja je dovoljna da uzorak bude potopljen. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.