

DOKAZIVANJE *LEISHMANIA* SPP. - BOJENI PREPARAT

Uputstva za transport uzoraka

Kostna srž

Razmaz kostne srži na predmetnom staklu, nakon sušenja (1 sat), transportovati u zatvorenoj kutiji za predmetna stakla. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Apsirat/bioptat promene na koži

Uzorak staviti u 1ml sterilnog fiziološkog rastvora, u sterilnu posudu sa poklopcem na navoj, tako da uzorak bude potopljen i transportovati na sobnoj temperaturi u roku od 2 sata ili na + 4 °C u roku od 24 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.