

Uputstva za uzimanje i transport uzorka krvi za detekciju antitela ili antigena parazita i gljiva

Krv

U epruvetu bez antikoagulansa uzeti 4 -5 ml krvi venepunkcijom (venski kateter,...) i epruvetu zatvoriti. Uzorak transportovati u roku od 2 sata na sobnoj temperaturi (18-25 °C), ili u roku od 24 sata na temperaturi od 2-8°C. Ukoliko je serum već izdvojen, transport treba obezbediti u roku od 5 dana na temperaturi od 2-8°C. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

Napomena: krv se ne sme zamrzavati.