

**DOKAZIVANJE *TRICHOMONAS VAGINALIS* – NATIVNI PREPARAT**  
**IZOLACIJA *TRICHOMONAS VAGINALIS* – KULTIVISANJE**

**Uputstva za uzimanje i transport uzoraka**

**Bris vagine**

Uzorak uzeti sa vaginalne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37 °C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

**Ispirak vagine**

Ispirak vagine transportovati u sterilnoj posudi na 37 °C, do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

**Bris cerviksa**

Uzorak uzeti sa cervikalne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37°C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

**Bris uretre**

Uzorak uzeti sa uretralne sluznice, uz rotiranje brisa. Transportovati na 37°C u prethodno zagrajenom (na 37 °C) fiziološkom rastvoru (0,5ml) ili Diamond medijumu (5ml), do 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

**Urin**

Uzeti prvi jutarnji mlaz urina i transportovati u posudi za urin, na 37°C u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.

**Eksprimat prostate**

Eksprimat prostate transportovati u posudi za urin, na 37°C u roku od 2 sata. Uzorak upakovati tako da bude zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja.